

## دستورالعمل استفاده :

## آلارم ها

- ✓ زمانی که چراغ آلارم با بوق مداوم روشن می شود، می بایست دستگاه را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.
- ✓ اگر این وضعیت دوباره اتفاق بیفتد، لطفاً با واحد خدمات پس از فروش شرکت تدا تماس بگیرید.
- ✓ زمانی که چراغ آلارم با بوق متناوب چشمک زن می شود، می بایست کلید Stop را برای قطع آلارم فشار داده، دستگاه را خاموش کنید و پس از رفع ایراد، دستگاه را مجدداً روشن کنید.

علامت آلارم	علایم وابسته	دلایل احتمالی
AIR	---	هوا در مسیر ست وارد شده است
DOOR	---	درب پمپ باز است
OCCL.	---	در مسیر تزریق انسداد ایجاد شده است
LOW BATT.	---	ولتاژ باتری کم شده است
EMPTY	---	مخزن محلول خالی شده است
DRIP	علامت "1" چشمک می زند	اختلال در قطره شمار ایجاد شده است
	علامت "2" چشمک می زند	نصب نادرست ست سرم در محل های مشخص شده
	علامت "3" چشمک می زند	استفاده ست سرم غیر استاندارد
	علامت "4" چشمک می زند	مربوط به پمپ OT-701
	علامت "5" چشمک می زند	هدر رفتن مایع تزریق
*	علامت "6" چشمک می زند	قسمت Finger Cassette کثیف می باشد
	علامت "7" چشمک می زند	قسمت Tube Cassette نصب نشده است
	علامت "8" چشمک می زند	قسمت Finger Cassette نصب نشده است
*	علامت "9" چشمک می زند	قطره شمار نصب نشده است
---	علامت Flow Indicator چشمک میزند	عمل تزریق قطع شده است
---	علامت VOL. INFUSED چشمک میزند	عمل تزریق تمام شده است

## نصب ست سرم

- (۱) در ابتدا کلمپ ست (G) را در جهت فلش به طرف چپ بکشید.
- (۲) ست را از مسیری که مشخص شده (A) رد کنید و دقت داشته باشید که ست می بایست بصورت (S) شکل خم شود.
- (۳) سپس ست را مستقیم از مسیر (B) تا (D) رد کنید.

## نصب قطره شمار

قطره شمار می بایست بر روی چمبر ست، در فضای بین قطره چکان و مایع سرم نصب شود بطوریکه همسطح سوزن چمبر باشد.



## روشن تنظیم Adjust

تنظیمات می بایست در حالت Stop دستگاه انجام شود.

(۴) کلید Adjust را فشار دهید. سپس نشانگر Adjust Mode چشمک زن می شود.

(۵) از کلیدهای  و  برای وارد کردن مقدار تنظیمات استفاده نمایید. (محدوده تنظیمات تا مقدار  $\pm 3\%$ )

(۶) دکمه Set را فشار دهید. زمانی که عدد وارد شده ثابت شد، نشانگر (Adjustment Mode) ثابت می شود.

برای نمونه می توانید از جدول زیر برای تنظیمات استفاده نمایید:

Solution Type	Adjustment Range
Standard	0 %
Dextrose	Abt. +5 %
Dextrose(50%)	Abt. +10 %
TPN Solution	Abt. +5~10 %
TPN+FAT - Soluble Vitamin	Abt. +10~20%

